


Assist X – en veileder for bruk og innstillinger

Innhold

01	Innledning	3
	Om Assist X	3
	Funksjoner	3
02	I bruk	4
	Lading	4
	Kontaktinformasjon	4

01 Innledning

Assist X er et mobilt varslingsystem for en eller flere brukere. Settet består av en sender og en mottaker. Man kan i tillegg koble til forskjellige brytere og sensorer for alternativ betjening.

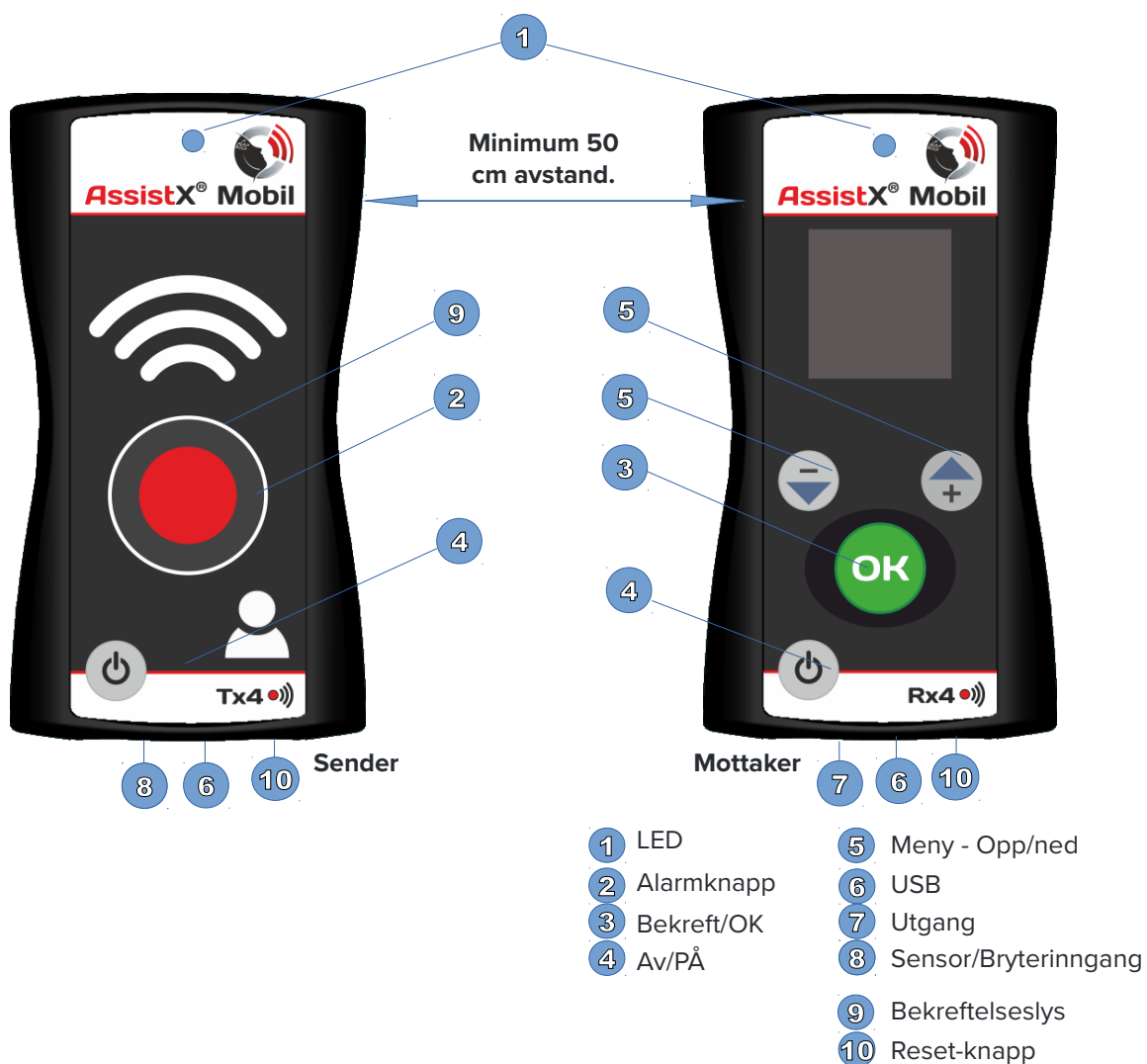

02

I bruk

Når man trykker på alarmknappen på sender blir LED-lyset rødt og den avgir et pip. Mottaker vil pipe, vibrere og blinke hvitt samtidig som displayet viser hvilken enhet som har utløst alarm. Den vil fortsette slik inntil mottaker har trykket OK. Når mottaker har trykket OK vil LED-lys på sender bli grønne for å bekrefte at alarm er mottatt. Sender trykker alarmknappen 1 gang for å gjøre det klart til evt. nye alarmer.

Lading

I ett sett følger det med en mobil lader og en dockingstasjon. Vi anbefaler å la mottakerenhet stå i dockingstasjonen og bruke mobillader til senderen.

Rekkevidde

Rekkevidde er alltid vanskelig å kunne avgjøre uten å faktisk teste utstyret der det skal brukes. Dette avhenger av bygningens konstruksjon osv.

Vi anbefaler å teste rekkevidden ved førstegangsbruk for å gjøre seg kjent med hvor den vil fungere og ikke.

Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Support

Tlf: 22 12 14 50
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse

Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo

Postadresse

Cognita AS
Gjerstadveien 396
4993 Sundebru