

Grid  Pad

Kom i gang
Grid Pad Go 8 og 10

Vedlikehold av din Grid Pad

Plasser Grid Pad et trygt sted, uten harde objekter som lener eller presser seg mot skjermen, når den ikke er i bruk.

Rengjøring

Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere risikoen for at bakterier overføres mellom brukere bør enheten rengjøres regelmessig med en rensesklut.

For en dyp rengjøring kan du bruke en alkohol-basert klut etter at du har rengjort med renseskluten.


Enheden bør ikke dyppes i vann eller rengjøres med en våt klut, gelè, poleringsvæske, eller andre invaderende produkter.

Beskyttelse

Grid Pad Go er klassifisert til IP-65 for beskyttelse mot sprut og dråper, med forseglede porter og et tøft eksteriør. Enheden er bygget for å motstå en dråpe på 1,2mol.


Slå på Grid Pad

For å slå på Grid Pad trykker du på på-knappen, øverst på enheten.

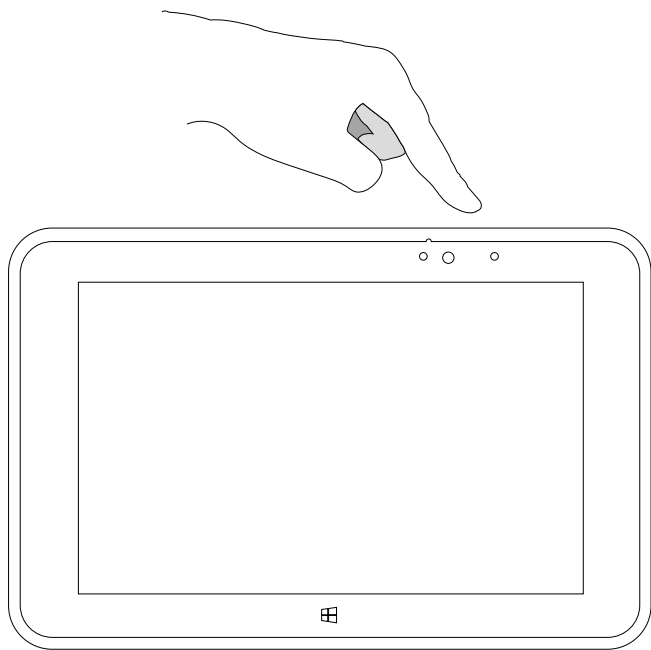

Lade Grid Pad

For å lade Grid Pad plugges du ladekabelen i en kraftkilde og setter den inn i enheten som vist nedenfor.

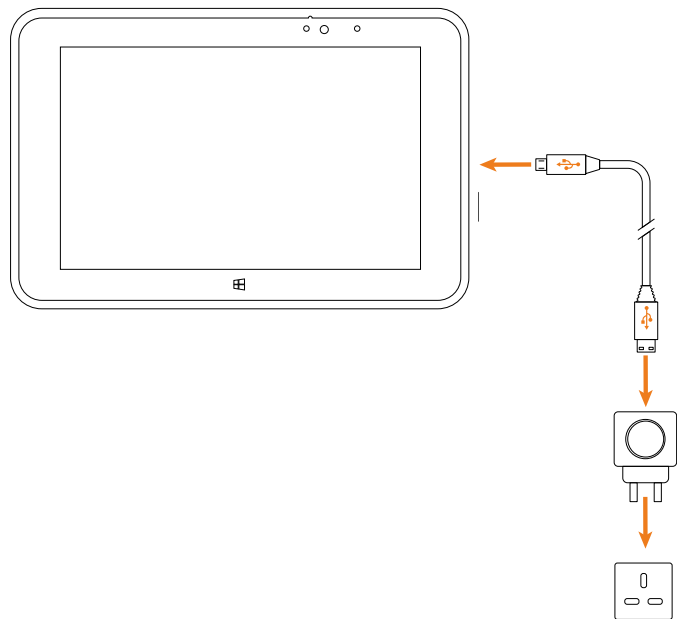

Parre Bluetooth-høytaler

Følg trinnene nedenfor hvis du må parre Bluetooth-høytaleren med Grid Pad om igjen:

1. Følg instruksjonene som fulgte med høytaleren for å gå inn i paringsmodus.
2. På enheten går du til: PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth > Bluetooth på. Nå søker den automatisk.
3. Velg høytaleren din fra listen du vil parre.

Høytaleren lades ved å koble USB-porten til Grid Pad strømforsyning.

Veiledning for batteri

Få mest mulig ut av batteriet

Grid Pad Go-batteriet varer i gjennomsnitt 7 timer.

Ladeveiledning

Det tar mellom 2,5 og 3,5 timer å lade batteriet på enhetene dine.

Spesifikasjoner

Go 10

Processor	Intel Atom E3940 Quad Core 1.6 GHz (1.8 GHz Turbo)
Minne	4GB
Hard drive	64GB
Grafikk-kort	HD 500 Base 400 MHz, Burst 600 MHz
Dimensjoner (mm)	269 x 180 x 12.5
Batteri	10 timer
Kamera	2 MP front and 8 MP rear
Skjerm	10.1" 2560 x 1600
Kobles til	Wi-fi and Bluetooth
Porter	1 x USB-C

Spesifikasjoner

Go 8

Processor	Intel Atom E3940 Quad Core 1.6 GHz (1.8 GHz Turbo)
Minne	4GB
Hard drive	64GB
Grafikk-kort	HD 500 Base 400 MHz, Burst 600 MHz
Dimensjoner (mm)	228 x 150 x 13
Batteri	7 timer
Kamera	8 MP rear
Skjerm	8.4" - 2560 x 1600
Kobles til	Wi-fi and Bluetooth
Porter	1 x USB-C

Lined area for writing or drawing.

A series of horizontal lines for writing.

Garanti

Grid Pad enheter er dekket av standar garanti på 2 år.

Reparasjoner

Ikke forsøk å åpne Grid Pad. Hvis enheten har behov for reparasjon kontakt forhandler.

For mer informasjon kan du besøke www.thinksmartbox.com.

Erklæring om samtykke

Dette apparatet samsvarer med kravene til direktiv 93/42/EEC som omhandler medisinske enheter. Dette produktet er underlagt Direktiv 2002/96/EC av det Europeiske parlamentet og styret for den Europeiske Unionen om elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE), og skal ikke kastes som usortert kommunalt avfall. Benytt ditt lokale avfallsanlegg for å kvitte deg med dette produktet.



Smartbox

US Office

Smartbox Assistive Technology Inc
2831 Leechburg Road
Lower Burrell
Westmoreland
PA
15068-2539

UK Office

Smartbox Assistive Technology Ltd
Ysobel House, Enigma Commercial Centre
Sandys road
Malvern, WR14 1JJ, UK

+44 (0) 1684 578868
info@thinksmartbox.com

www.thinksmartbox.com