

Informasjon til bruker

- Cognita Fallalarm enkel

- **Slå på** Fallalarmen: trykk og hold inne grønn knapp.
- **Slå av** Fallalarmen: trykk og hold inne begge knappene samtidig.
- **Vi anbefaler å ha enheten i bukselinningen eller hengende rundt halsen.**
Eventuelt i en brystlomme eller annen «trang» lomme.
Viktig at den står i vertikal posisjon (oppreist) når du er ute og går.
- **Dersom Fallalarmen kommer ut av vertikal posisjon** teller den ned i ca 15 sekunder, deretter piper den høyt i ca 15 sekunder for at du skal få tid til å rette den opp.
Hvis den blir liggende utløser alarmen og det går anrop og sms til telefonnummeret som er programmert.
- **Dersom Fallalarmen piper og du ikke trenger hjelp**, retter du opp alarmen.
Da vil den ikke varsle.
- **Et langt trykk på varseltrekanten** ringer opp det første telefonnummeret som er programmert, samt sender kart over hvor du befinner deg hvis du trenger hjelp og kan trykke selv.
- **Den som får alarmen/anropet** er den som avslutter samtalen.
- **Det er ikke nødvendig å slå av Fallalarmen for å spare strøm.** Bare sett den i bordladeren når den ikke er i bruk, dersom du for eksempel skal hvile på sofaen.

OBS! Cognita Fallalarm er avhengig av gyldig sim-kort, mobil- og GPS dekning for at den skal fungere. Cognita Fallalarm bli individuelt tilpasset, avvik i denne veiledningen kan dermed forekomme. For eksempel antall sekunder den piper etc.



Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Support
Tlf: 22 12 14 50
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse
Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo

Postadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396
4993 Sundebru