

Jouse 2

- monteringsveiledning

Montering

Monter klemmen i bunnen av Jouse på deres bord.
Påse at klemmen er i flukt med kanten av bordet.
Juster armen så den er riktig plassert i forhold til brukeren.
Den store klemmen løsnes når arm justeres for brukeren.

Plasser Jouse "boksen" på bordet og koble til kabelen fra "jouse armen". Koble deretter usb kabel fra datamaskin til Jouse boks.

Ingen drivere er nødvendig og Jouse vil da være klar for bruk.

Der er ingen Av/på bryter for Jouse, Jouse mottar strøm fra datamaskinen.



Funksjoner

Ved å bevege munnstykket, vil man bevege musepeker og Jouse fungerer som en mus.

- Venstreklikk: Blås
- Høyreklikk: Sug
- Dobbeltklikk: Blås raskt 2 ganger

Munnstykke

Man har flere typer munnstykker til Jouse.

Hvite engangsmunnstykker:

- Presses bare inn i åpningen for munnstykke.

Sorte munnstykker:

- Skrus inn i åpningen for munnstykke.



Bryteringanger

Jouse har 2 bryteringanger hvor man kan koble til eksterne brytere, disse fungerer som høyre og venstre trykk.



Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Support

Tlf: 22 12 14 50
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse

Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo

Postadresse

Cognita AS
Gjerstadveien 396
4993 Sundebru